

大きく・はっきり・清潔に

—ストレスの無い毎日を—



抗菌加工で安心清潔

SIAA 認証の抗菌素材を採用！

抗菌率 **99%** 以上

※未加工品との比較

製品表面における
細菌の増殖を抑制！！

SIAA

ISO 22196


抗菌加工

JP0123234A0001R

デジタル方式採用で最高の音質

デジタルICチップ採用でクリアな音質を実現
雑音も軽減で聞こえやすさアップ

デジタル集音器とアナログ集音器の違い

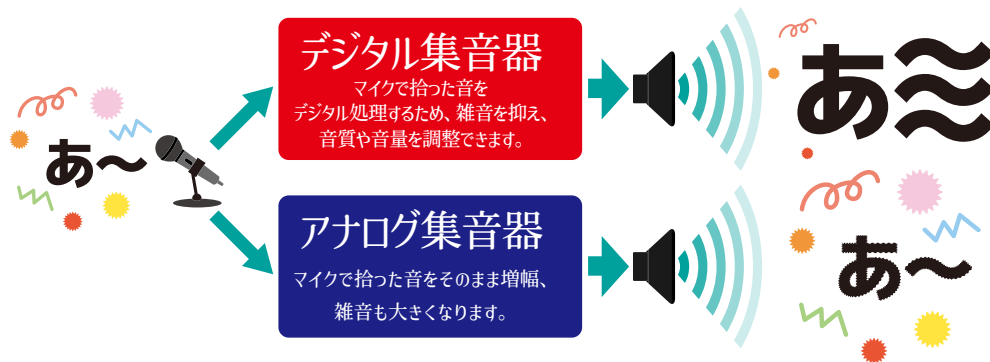

雑音低減イメージ

装着前

人の声 騒音

※1600Hzの周波数帯域の測定条件

60db

60db

デジタル

処理

装着後

聞こえやすさ
3割以上UP!!



64%
DOWN!

21.6db


47%
UP!

88.3db

更に快適な聞こえの為の特徴

360° 全方位マイク搭載

一般的なマイクは扇型で集音しますが、**本製品のマイク**は全方位からの音を集音します。これによってより自然な聞こえを提供します。

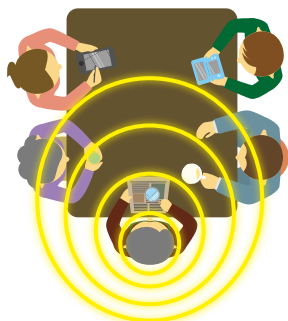



両耳装着の利点

より自然な聞こえには
両耳装着がおすすめ

両耳装着は片耳装着より、音の方向や距離感がつかみやすくなります。また、左右で聞こえのバランスの調整をすることができるので、耳への負担が低減されます。

片耳装着の場合

両耳装着の場合

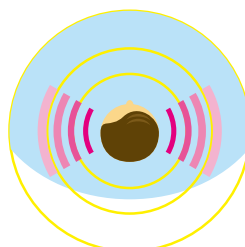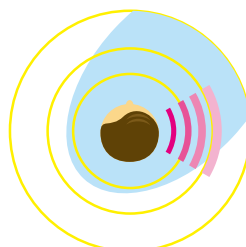

HOW To ハウリング対策

集音器はその構造上、ハウリングは必ず起こります。不快なハウリングを起こさないようにしっかり対策しましょう。

耳穴に



しっかり入れる

10秒以内に



装着

耳穴に装着してから



電源を入れてもOK!!

安定した動作のために一日一回、充電ケースへの充電(目安:3時間)を行っていただくことをおすすめします。

充実のサポートサービス

集音器が初めての方でも
安心していねいに
サポートいたします。



アフターサービス窓口

TEL:052-602-7772

受付時間：10:00～17:00
(土日祝・お盆年末年始を除く)



安心の一年保証

満足してお使いいただくために、
安心と信頼の一年保証。

毎日、顔に触れるものだから 清潔でありたい



製品仕様

商 品 名	USB 充電式耳穴型集音器 KSOK-01
仕 様	2個入り【両耳】耳穴ワイヤレス
適 応 難 聴 レベル	軽度～中度
重 量 (本 体 1 個)	約4g
ボ リ ュ ム 調 整	ボタン (5段階)
S I A A 認 証	○ 登録番号 JP0123234A0001R
充 電 方 法	USB 充電式
充 電 ケ ー ス	○
連 続 使 用 時 間	約8～14時間 (使用環境により変動)
保 証 期 間	12ヶ月
サポート体制 / 音質について	
アフターフォロー お客様サポート窓口	○
ハウリング抑制 ピーピー音を抑える	○
雑音軽減機能 不要な雑音を抑える	○
音声増幅機能 人の声の音域を増幅し聞きやすくする	○

適応範囲目安【軽度～中等度】難聴の方におすすめです。

軽度 25～40dB

小さな声は聞き取りにくい。
テレビの音を大きくする。

中等度 40～70dB

普通の会話が聞き取りにくい。

高度 70～90dB

大きな声でも聞き取りにくい。

※本製品は音や声を大きくする集音器であり、医療機器である補聴器ではありません。
※画像は開発中のものです。実際の商品と仕様が異なる場合があります。

※聞こえには個人差がありますのでご了承ください。



詳しい内容や使い方を
動画でチェック!!

集音器 使用方法

使用前に必ずケースに本体を収納した状態で充電してください。(約 3 時間で満充電)

集音器をケースから取り出し、耳穴に装着します。

ケースから取り出すと、ピッ、ピッ… (スタンバイモードの音)
このような音が 4 回鳴り、**10 秒後に自動で電源が ON になります。**
自動で電源が入るまでの間に装着すると耳に不快なハウリングが
起きにくく装着直後でも快適にお使いいただけます。

もしも 10 秒以内に取り付けられなくて、ハウリングが鳴ってしまった。
そんな場合は、タッチセンサーを 6 秒間押し続け、電源をオフにします。
電源はオフのまま、耳へ装着し、装着した集音器のタッチセンサーを
再び 6 秒間押し続けると電源が入ります。

装着の際の注意点

装着前に、必ず**集音器の左右 (R: 右耳用 / L: 左耳用)**を確認し、
**R・L 表記を上にした状態で、耳の穴へと回すようにしっかりと
押し込んで装着**してください。

また、装着時に耳への違和感やハウリングが起こりやすい場合は
イヤーチップのサイズを耳に合うものに取り替えてください。

装着できたら、次は音量を調節してください。

集音器本体についている**タッチセンサーを約 2 秒間押すと
音量を 1 段階ずつ切り替え**られます。最大音量・最小音量に
なった際は音がお知らせしてくれます。**5 段階の調節が可能
ですので、聴力に合わせた音量に調節**してください。
音量を設定すると、次回ご使用の際は前回設定した音量から
スタートします。

使用後の収納

使用後は、必ず**ケースへ戻して充電**しましょう。
収納すると自動で電源はオフになります。

使用後の注意点

充電済みのケースに収納してください。

収納の際、ケースの充電がされていない状態で本体を収納すると、
自動 ON/OFF 機能が使用できなくなり、ケース内で本体が
ハウリング (ピーという音) してしまいます。

快適にお使いいただく為に、**1 日 1 回、満充電にしてからご使用**ください。
(約 3 時間で満充電になります)

